

Gebrauchsanweisung

Hya®-Ophtal® sine

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
mit Hya®-Ophtal® sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet, angenehm erfrischt und beruhigt. Somit werden die subjektiven Symptome einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert. Hya®-Ophtal® sine enthält Hyaluronsäure, die als natürliches Polymer auch in Strukturen des menschlichen Auges und des natürlichen Tränenfilms vorkommt. Somit ist Hya®-Ophtal® sine gut verträglich.
Hya®-Ophtal® sine eignet sich zur Benetzung und Nachbenetzung sowohl weicher als auch harter Kontaktlinsen und verbessert spürbar den Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen über den ganzen Tag.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung von Hya®-Ophtal® sine. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder gern auch an uns.
Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Welche Darreichungsformen sind erhältlich?

Hya®-Ophtal® sine gibt es in Packungen mit 20 oder 60 Einzeldosis-Behältnissen mit je 0,5 ml Lösung.
Die Lösung enthält 0,2% Hyaluronsäure sowie Hilfsstoffe und ist konservierungsmittelfrei.



Wann sollten Sie Hya®-Ophtal® sine benutzen?

Hya®-Ophtal® sine erfrischt und beruhigt Ihre Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen und Müdigkeit. Diese Symptome werden oftmals durch z. B. langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft, Klimaanlage, Zigarettenrauch oder Zugluft verursacht. Aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Anti-Baby-Pille), bestimmte Erkrankungen oder auch Konservierungsmittel in manchen Augentropfen können das Trockenheitsgefühl hervorrufen.
Hya®-Ophtal® sine ist auch zur Benetzung von weichen und harten Kontaktlinsen sowie für deren Nachbenetzung während des Tragens sehr gut geeignet.

Wie wenden Sie Hya®-Ophtal® sine an?

Je nach Bedarf tropfen Sie je 1 Tropfen in den Bindehautsack. Hya®-Ophtal® sine ist täglich beliebig häufig nach Bedarf anwendbar.

Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte der Grafik. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Einzeldosis-Behältnisse beim Tropfen möglichst senkrecht halten.

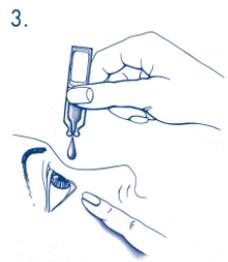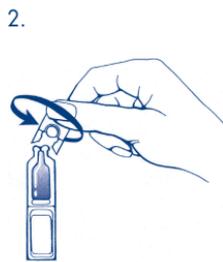

Bitte vermeiden Sie eine Berührung des Einzeldosis-Behältnisses mit dem Auge und der Kontaktlinse, um eine mögliche Verletzung bzw. Beschädigung zu vermeiden.

Was ist bei der Anwendung von Hya®-Ophtal® sine zu beachten?

Hya®-Ophtal® sine enthält zur besseren Verträglichkeit keine Konservierungsmittel. Das Einzeldosis-Behältnis sollte nach dem Gebrauch nicht aufbewahrt, sondern entsorgt werden. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Einzeldosis-Behältnisse, da der Inhalt dann nicht mehr steril ist. Verwenden Sie Hya®-Ophtal® sine nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums.

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Das Präparat sollte dann nicht weiter angewendet werden.

Hersteller:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin

Tel.: 030 - 33093 - 5070, Fax: 030 - 33093 - 305, E-Mail: service@drwinzer.de, Internet: www.drwinzer.de



EU – Freihandelszeichen
plus ID Benannte Stelle



Sterilisationsverfahren,
Aseptisch



Das Einzeldosis-Behältnis nach Anbruch
bitte nicht wiederverwenden.



Die Lagerung von Hya®-Ophtal® sine
soll nicht bei einer Temperatur
über +25 °C erfolgen.



Nicht verwenden, wenn Einzeldosis-
Behältnis beschädigt ist.



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.



(JJJ-MM)

Mindesthaltbarkeitsdatum



Chargenbezeichnung

Weitere Informationen zu Hya®-Ophtal® sine

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen, Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen, verklebte Augen am Morgen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Hya®-Ophtal® sine Ihren Augen helfen?

Hya®-Ophtal® sine verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind längere Zeit mit wohltuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus.

Hya®-Ophtal® sine ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige klare Sicht ohne Schlieren ermöglicht. Hya®-Ophtal® sine erhalten Sie in Einzeldosis-Behältnissen ohne Konservierungsstoffe.

Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

85009 PB 764/2a/CE

Anzeige

Wünschen Sie ausführlichere Informationen zu diesem Thema?

ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 - 330 93 - 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere **mehrsprachige** Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen. Darin enthalten sind Informationen und Tipps in **deutscher, englischer, italienischer** und **türkischer, arabischer** als auch **russischer** Sprache.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie an und Sie erhalten umgehend Ihre Broschüre.

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:

Dr. Winzer Pharma

Service „Trockenes Auge“
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin

Tel.: 030 - 330 93 - 5070

Fax: 030 - 330 93 - 305

E-Mail: service@drwinzer.de