

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch– sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produkts.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac®-Ophtal® Gel sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche intensiv befeuchtet und beruhigt. Somit werden die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Zweckbestimmung:

Lac®-Ophtal® Gel sine ist ein Augenbenetzungsmittel.

Anwendung:

Lac®-Ophtal® Gel sine verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei starkem Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage.

Inhaltsstoffe:

Jedes 0,6 ml Eindosisbehältnis enthält 0,2% Carbomer, Sorbitol, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser und ist konservierungsmittelfrei.

Wie oft sollten Sie Lac®-Ophtal® Gel sine anwenden?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Geltröpfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® Gel sine kann täglich 3-5 mal angewendet werden oder häufiger wenn erforderlich.


Wie sollte Lac®-Ophtal® Gel sine angewendet werden:

Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel sine die Hände zu waschen.


Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte den Abbildungen.




1. Bitte trennen Sie ein Einzeldosis-Behältnis ab, indem Sie dieses an der Etikettseite anfassen und abziehen.

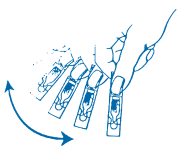

2. Bitte schlagen Sie das Einzeldosis-Behältnis einige Male mit der Hand nach unten aus bis sich die gesamte Gel-Menge im Hals des Eindosis-Behältnisses befindet.

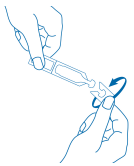

3. Drehen Sie die Verschlusskappe des Einzeldosis-Behältnisses ab.

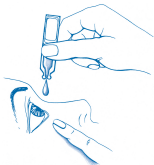

4. Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken und ziehen Sie mit dem Zeigefinger der freien Hand das Unterlid leicht nach unten. Bringen Sie jetzt das Einzeldosis-Behältnis senkrecht über dem Auge in Position und geben Sie durch leichtes Zusammendrücken in jedes Auge einen Tropfen.

5. Schließen Sie danach Ihr Auge und bewegen Sie es leicht hin und her, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Gegenanzeigen:

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Wichtige Informationen zu Lac®-Ophtal® Gel sine:

- Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (Reizungen und Unverträglichkeiten) das Produkt nicht weiter anwenden. Sollten diese länger andauern, kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Sicherheitshinweis für Patienten mit schweren Schäden der Hornhaut: In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Calciumphosphat auf der Hornhaut während der Behandlung mit phosphathaltigen Augenprodukten berichtet.
- Achten Sie darauf, dass die Tropfspitze nicht mit Ihren Augen oder Fingern in Berührung kommt, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung oder Verletzung der Augen zu vermeiden.
- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Kontaktlinsen müssen vor der Anwendung herausgenommen werden. Sie können diese 15 (besser 30) Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.
- Unmittelbar nach Anwendung kann das Sehen kurzzeitig verschwommen sein. Bedienen Sie keine Maschinen oder Kraftfahrzeuge während dieser Zeit, sondern warten Sie bis Ihre Sicht wieder klar ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Einzeldosis-Behältnis nach dem Gebrauch entsorgen.
- Überprüfen Sie vor der ersten Anwendung den Inhalt der Verpackung. Verwenden Sie keine bereits geöffneten oder beschädigten Einzeldosis-Behältnisse.

Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® Gel sine gibt es in den Packungen mit 30, 60 oder 120 Einzeldosis-Behältnissen mit je 0,6 g Gel.

Aufbewahrung:

Bewahren Sie das Medizinprodukt bei einer Temperatur von maximal 25 °C und vor Licht geschützt auf.

CE 0483



Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,
Brunsbütteler Damm 165 - 173, D-13581 Berlin
E-Mail: service@drwinzer.de



Sterilisiert durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken.



Obere Temperaturbegrenzung 25 °C.



Nicht wiederverwenden.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Gebrauchsanweisung beachten!



Verwendbar bis:



Chargenbezeichnung



Hersteller



Von Sonnenlicht fernhalten.

Lac®-Ophtal® Gel sine, 2014-10

®/™ sind Warenzeichen der Dr. Robert Winzer Pharma GmbH oder ihrer verbundenen Unternehmen. 84216 PB 280/2-DE / P9DE01

© Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

..... ✂
Anzeige

Wie kann Lac®-Ophtal® Gel sine Ihren Augen helfen?

Lac®-Ophtal® Gel sine verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohltuender und beruhigender Feuchtigkeit versorgt.

Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 – 33 0 93 – 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax
oder E-Mail und Sie erhalten
umgehend Ihre Broschüre.

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:

(Versions-Nr.)
(Präparate-Nr.: 280)