

Lac®-Ophtal® MP sine

DR. WINZER

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
mit Lac®-Ophtal® MP sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet, angenehm erfrischt und beruhigt. Somit werden die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert.

Lac®-Ophtal® MP sine eignet sich zur Befeuchtung und Erfrischung des Auges sowie zur Benetzung und Nachbenetzung weicher und harter Kontaktlinsen. Konservierungsmittelfrei.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung von Lac®-Ophtal® MP sine. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Inhaltsstoffe:

Jedes 0,6 ml Einzeldosisbehältnis enthält 2% Povidon, Natriumchlorid, Natriumhydroxid-Lösung, Borsäure, Wasser und ist konservierungsmittelfrei.

Wann sollten Sie Lac®-Ophtal® MP sine benutzen?

Lac®-Ophtal® MP sine erfrischt und beruhigt die Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage. Lac®-Ophtal® MP sine ist auch zur Benetzung und Nachbenetzung von weichen und harten Kontaktlinsen sehr gut geeignet. Die Anwendung erleichtert das Einsetzen der Kontaktlinsen und verhindert Irritationen und Missempfindungen beim Tragen.

Wie wenden Sie Lac®-Ophtal® MP sine an?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Tropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® MP sine ist täglich beliebig häufig anwendbar. Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Augentropfen die Hände zu waschen.


Für Kontaktlinsenträger: Geben Sie jeweils vor dem Einsetzen einen Tropfen Lac®-Ophtal® MP sine auf die Seite der Kontaktlinse, die dem Auge zugewandt ist. Zur Nachbenetzung bei Bedarf 1-2 Tropfen Lac®-Ophtal® MP sine in das Auge eintropfen. Kontaktlinsen können bei der Anwendung der Augentropfen im Auge bleiben.

Es wird empfohlen nach dem Eintropfen mehrmals zu blinzeln, dadurch kann sich der Tropfen optimal auf der Augenoberfläche verteilen. Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte den Abbildungen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Einzeldosisbehältnisse beim Tropfen möglichst senkrecht halten und eine Berührung mit dem Auge vermeiden.


1.



2.

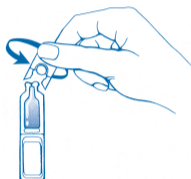

3.

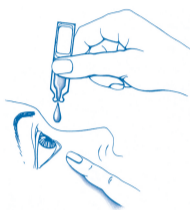**Gegenanzeigen:**

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Auftreten von Reizungen und Unverträglichkeiten das Produkt nicht mehr anwenden.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge und der Kontaktlinse vermeiden.
- Einzeldosis-Behältnis nach dem Gebrauch entsorgen.
- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Anwendung den Inhalt der Verpackung. Verwenden Sie keine bereits geöffneten oder beschädigten Einzeldosis-Behältnisse.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nur zur Anwendung am Auge.

Warnhinweise:

Es ist wichtig, dass Sie die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung für eine richtige Anwendung der Augentropfen beachten.

Weiter bestehende oder zusätzlich auftretende Augenprobleme sollten medizinisch abgeklärt werden. Wenn das Auge schmerzt, entzündet und gerötet ist, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen und suchen Sie einen Arzt auf.

Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® MP sine gibt es in den Packungen mit 30, 60 oder 120 Einzeldosis-Behältnissen mit je 0,6 ml Lösung.

..... ✂
Anzeige

ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 – 33 0 93 – 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere **mehrsprachige** Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen. Darin enthalten sind Informationen und Tipps in **deutscher, englischer, italienischer** und **türkischer, arabischer** als auch **russischer** Sprache.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie an und Sie erhalten umgehend Ihre Broschüre.

Dr. Winzer Pharma

Service „Trockenes Auge“
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin

Tel.: 030 – 33093 – 5070

Fax: 030 – 33093 – 305

E-Mail: service@drwinzer.de

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:



Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,
Brunsbütteler Damm 165 - 173, D-13581 Berlin
Tel: 030 – 330 93 – 5070, Fax: 030 – 330 93 – 305,
E-Mail: service@drwinzer.de



Sterilisationsverfahren, aseptisch.



Obere Temperaturbegrenzung 25 °C.



Nicht zur Wiederverwendung.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Gebrauchsanweisung beachten!



Verwendbar bis:



Chargenbezeichnung

Lac®-Ophtal® MP sine, 2009-05

84101 PB 225/1/CE

Weitere Informationen zu Lac®-Ophtal® MP sine

Anzeige

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen, verklebte Augen am Morgen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Lac®-Ophtal® MP sine Ihren Augen helfen?

Lac®-Ophtal® MP sine verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohlthuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus. Lac®-Ophtal® MP sine ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige klare Sicht ohne Schlieren ermöglicht.

Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

Lac®-Ophtal®		ohne Konservierungsstoffe
Lac®-Ophtal® system mit 2% Povidon	Angenehme Erfrischung und Befeuchtung bei leichtem, gelegentlich auftretendem Trockenheitsgefühl	✓ · innovatives Tropfsystem · 12 Wochen nach Anbruch haltbar
Lac®-Ophtal® MP sine mit 2% Povidon		✓ · Einzeldosisbehältnis · praktisch für unterwegs
Lac®-Ophtal® MP mit 2% Povidon		· Standard-Tropfflasche
Lac®-Ophtal® Gel sine mit 0,2% Carbomer	Langanhaltende intensive Befeuchtung bei starkem Trockenheitsgefühl – auch ideal für die Anwendung über Nacht	✓ · Einzeldosisbehältnis · praktisch für unterwegs
Lac®-Ophtal® Gel mit 0,2% Carbomer		· Standard-Tropfflasche

Anzeige

Ihre Meinung ist uns wichtig!

1. Wie sind Sie auf Lac®-Ophtal® MP sine aufmerksam geworden?

- Empfehlung des Arztes, Fachrichtung: _____
 Empfehlung des Apothekers Empfehlung von Verwandten oder Bekannten
 Werbung Sonstiges: _____

2. Aus welchem Grund wenden Sie Lac®-Ophtal® MP sine an?

- Zur Linderung gereizter Augen Zur Befeuchtung der Augen
 Anderer Grund: _____

3. Wie beurteilen Sie Lac®-Ophtal® MP sine hinsichtlich folgender Punkte?

- Beruhigung der Augen: sehr gut gut weniger gut schlecht
Befeuchtung der Augen: sehr gut gut weniger gut schlecht
Verträglichkeit: sehr gut gut weniger gut schlecht
Praktische Handhabbarkeit der Einzeldosis-Behältnisse: sehr gut gut weniger gut schlecht

4. Falls Sie Kinder haben, nutzen Sie Lac®-Ophtal® MP sine auch für diese?

- ja, Alter der Kinder _____ nein

5. Soziodemographische Angaben für statistische Zwecke:

Geschlecht: weiblich männlich Alter: _____

Ja, ich gebe meine Einwilligung, dass meine Daten bei Dr. Robert Winzer Pharma GmbH gespeichert werden. Die Daten werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Datum: Unterschrift: