

# Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

mit Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet, angenehm erfrischt und beruhigt. Somit werden die subjektiven Symptome einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert.

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system ist eine innovative Entwicklung aus dem Hause Dr. Winzer Pharma. Dabei handelt es sich um ein patentiertes unkonserviertes Mehrdosis-Behältnis, das mit seinem Ophtal<sup>®</sup>system den gestiegenen Ansprüchen von Anwendern mit Trockenheitsgefühl am Auge entspricht: sehr gute Verträglichkeit sowie eine leichte und sichere Anwendung. Es ermöglicht die präzise Dosierung eines einzelnen Tropfens.

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system eignet sich zur Benetzung und Nachbenetzung sowohl weicher als auch harter Kontaktlinsen und verbessert spürbar den Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen über den ganzen Tag.

Da Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system kein Konservierungsmittel enthält, ist es auch bei einer Daueranwendung sehr gut verträglich und ist 12 Wochen nach Anbruch verwendbar.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihren Apotheker und gern auch an uns. Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

## Welche Packungsgrößen sind erhältlich?

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system gibt es in Packungen mit 10 ml Augentropfen.

Die Lösung enthält 2% Povidon sowie Hilfsstoffe und ist konservierungsmittelfrei.

## Wann und wie häufig sollten Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system benutzen?




Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system erfrischt und beruhigt Ihre Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit. Diese Symptome werden oftmals durch z. B. langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft, Klimaanlage, Zigarettenrauch oder Zugluft verursacht. Aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Anti-Baby-Pille), bestimmte Erkrankungen oder auch Konservierungsmittel in manchen Augentropfen können das Trockenheitsgefühl hervorrufen.

Je nach Bedarf tropfen Sie je 1 Tropfen in den Bindehutsack. Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system ist täglich beliebig häufig nach Bedarf anwendbar.

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system ist zur Benetzung von weichen und harten Kontaktlinsen sowie für deren Nachbenetzung während des Tragens sehr gut geeignet.

## So wenden Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system an:

Der patentierte Pumpmechanismus von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system sorgt für ein sehr einfaches und sicheres Eintropfen. Die ergonomische Daumenstütze sorgt außerdem für eine einfachere und sicherere Handhabung.

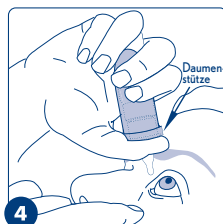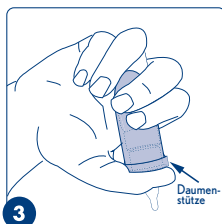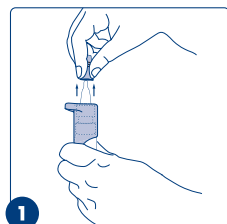


1. Entfernen Sie die Schutzkappe vor jeder Anwendung.
2. Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenstütze und halten Sie die Flasche unten mit mehreren Fingern fest, wie auf der Abbildung gezeigt.
3. Drehen Sie die Flasche um und halten Sie sie so wie auf der Abbildung gezeigt. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal verwenden, sind erst einige Druckbewegungen notwendig, bevor der erste Tropfen erscheint.
4. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger nach unten und halten Sie das Fläschchen in senkrechter Position. Drücken Sie vorsichtig auf die Daumenstütze, um einen Tropfen in Ihr Auge zu bringen. Schließen Sie dann Ihr Auge und bewegen Sie es langsam hin und her, damit sich der Tropfen optimal auf der Augenoberfläche verteilen kann.
5. Um eine Verunreinigung der Augentropfenlösung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Flaschenspitze weder mit Ihren Fingern noch mit dem Auge in Berührung kommt.
6. Setzen Sie die Schutzkappe nach jeder Anwendung wieder auf die Flaschenspitze.

Bitte verschließen Sie die Flaschenspitze mit der Schutzkappe sofort wieder nach Gebrauch.

## Was ist bei der Anwendung von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system zu beachten?

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system enthält zur besseren Verträglichkeit kein Konservierungsmittel. Dank des Ophtal<sup>®</sup>systems, ist Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system nach Anbruch der Flasche für einen Zeitraum von 12 Wochen verwendbar. Nach Ablauf des Verfalldatums verwenden Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system bitte nicht mehr.

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Das Präparat sollte dann nicht weiter angewendet werden. Verwenden Sie Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system nicht, wenn die Tropfflasche beschädigt ist.

 Hersteller: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, D-13581 Berlin  
Tel: 030 - 330 93 - 5070, Fax: 030 - 330 93 - 305, E-Mail: service@drwinzer.de  
Internet: www.drwinzer.de

 0483



Bitte benutzen Sie keine beschädigte Flasche.



Die Lagerung von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system soll in einem Temperaturbereich zwischen +1 °C bis +25 °C erfolgen.

**STERILE** A

Sterilisationsverfahren,  
Aseptisch



Nach Anbruch ist der in der Flasche verbleibende Inhalt von Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system 12 Wochen verwendbar.



Bitte beachten Sie die  
Gebrauchsanweisung!



Mindestverwendbarkeitsdatum

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dr. Robert Winzer Pharma GmbH oder ihrer verbundenen Unternehmen. © Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system, 2013-05

## Weitere Informationen zu Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system

### Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen, verklebte Augen am Morgen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

### Wie kann Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system Ihren Augen helfen?

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohlthuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus.

Lac<sup>®</sup>-Ophtal<sup>®</sup>system erhalten Sie in konservierungsmittelfreien Tropfflaschen, die aufgrund des Ophtal<sup>®</sup>systems nach Anbruch für einen Zeitraum von 12 Wochen verwendbar sind.

### Und das können Sie persönlich tun:

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

## Anzeige

3467401 83321PB932/4DE

Wünschen Sie ausführlichere Informationen zu diesem Thema?

## ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 - 33 093 - 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie an und Sie erhalten umgehend Ihre Broschüre.

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:

**Dr. Winzer Pharma**  
Service „Trockenes Auge“  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin

**Tel.:** 030 - 33 093 - 5070

**Fax:** 030 - 33 093 - 305

**E-Mail:** service@drwinzer.de Dr. Winzer Pharma