



Oxyal®

BENETZENDE AUGENTROPFEN
MIT HYALURONSÄURE UND
WICHTIGEN ELEKTROLYTEN

DR. WINZER

777139SA/7K

OXYD®

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch - sie enthält wichtige Informationen für die Anwendung des Produktes.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

Oxyal® Augentropfen werden angewandt zur Befeuchtung der Augenoberfläche sowie zur Linderung der Symptome des Trockenen Auges. Ein Trockenes Auge kann sich z.B. durch das Gefühl von müden, brennenden, gestressten und/oder geröteten Augen äußern. Oxyal® enthält Hyaluronsäure. Hyaluronsäure kommt im natürlichen Tränenfilm vor und ist für ihre stark feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt. In Kombination mit dem Polymer PEG 8000 befeuchtet Oxyal® die Augenoberfläche besonders nachhaltig und sorgt für ein besseres Gleiten der Lider auf dem Auge. Die wichtigen Elektrolyte (Kalium, Magnesium, Natrium und Kalzium) und die hypotonische Eigenschaft von Oxyal® tragen zum Abklingen der Beschwerden des Trockenen Auges bei und unterstützen die Wiederherstellung des physiologischen osmotischen Gleichgewichts des Tränenfilms und der Augenoberfläche. Oxyal® enthält ein innovatives Konservierungsmittel, das am Auge in die natürlichen Bestandteile des Tränenfilms Sauerstoff, Wasser und Salz-Ionen zerfällt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder gern auch an uns. Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Zweckbestimmung von Oxyal®:

Augenbefeuchtungsmittel auch zur (Nach-)Benetzung weicher und harter Kontaktlinsen während des Tragens.

Anwendung:

Oxyal® wird zur Beruhigung und Linderung der Symptome des Trockenen Auges angewendet. Symptome hierfür können sein: Reizung der Augenoberfläche, Rötung, brennende Augen, Trockenheit, Lichtempfindlichkeit sowie das Gefühl von müden, schmerzenden Augen und dem sog. Sandkorngefühl. Diese Symptome können z. B. durch Bildschirmarbeit, langes Fernsehen, trockene Raumluft oder Klimaanlage hervorgerufen werden. Oxyal® ist zur Benetzung von weichen und harten Kontaktlinsen sowie zur Nachbenetzung während des Tragens anwendbar.

Zusammensetzung:

0,15% Hyaluronsäure, 0,5% Polyethylenglycol 8000, Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Wasser, Borsäure und Oxyd®. Oxyd® wird als Konservierungsmittel verwendet, das sich auf der Augenoberfläche schnell in Sauerstoff, Wasser und Salz-Ionen umwandelt.



Wie häufig ist Oxyal® anzuwenden?

Tropfen Sie je nach Bedarf 1 Tropfen Oxyal® in das Auge. Oxyal® ist täglich beliebig häufig nach Bedarf anwendbar.

So wenden Sie Oxyal® an:

Die Abbildungen zeigen Ihnen die einfache Anwendung von Oxyal®.

Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie Oxyal® anwenden.

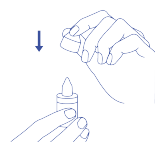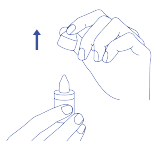

1. Entfernen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe der Flasche. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihrem Auge oder Ihren Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu verhindern.
2. Legen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten, ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten und halten Sie die Flasche vertikal mit der Tropfspitze nach unten zeigend über Ihr Auge. Drücken Sie anschließend vorsichtig einen Tropfen aus der Flasche.
3. Setzen Sie die Kappe nach jedem Gebrauch wieder auf die Flasche.

Gegenanzeigen:

Verwenden Sie das Produkt nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Oxyal®:

- In seltenen Fällen kann dieses Produkt Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. lokale allergische Reaktionen, verursachen. In diesen Fällen sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Passen Sie auf, dass die Spitze der Flasche nicht das Auge berührt, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Oxyal® enthält das Konservierungsmittelsystem Oxyd®.
- Nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.
- Bei Anwendung verschiedener Augenpräparate warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie ein weiteres Präparat eintropfen.
- Oxyal® ist für alle Arten von Kontaktlinsen geeignet und kann direkt auf die Kontaktlinsen getropft werden.


Welche Packungsgrößen sind erhältlich:

Oxyal® ist in Augentropfenflaschen zu 10 ml erhältlich.

Aufbewahrung:

Bewahren Sie das Medizinprodukt bei einer Lagerungstemperatur von +5 °C bis +25 °C auf.

CE 0483

 Dr. Mann Pharma,
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165–173,
13581 Berlin
Vertrieb: Dr. Robert Winzer
Pharma GmbH
Brunsbütteler Damm 165–173,
13581 Berlin
E-Mail: winzer@bausch.com

Oxyal® und Oxyd® sind
eingetragene Warenzeichen
der Dr. Robert Winzer Pharma
GmbH oder ihrer verbundenen
Unternehmen.
© Dr. Robert Winzer Pharma GmbH



Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden



Das Medizinprodukt kann nach
dem ersten Öffnen 2 Monate
verwendet werden.



Verwendbarkeitsdatum



Gebrauchsanleitung beachten



Chargennummer



Sterilisiert durch
Anwendung aseptischer
Verfahrenstechniken



Temperaturbegrenzung



Hersteller

Weitere Informationen zu Oxyal®

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Oxyal® Ihren Augen helfen?

Mit dem 2-Polymer-System aus Hyaluronsäure und PEG 8000 und zusätzlich Wasser mit Kalium, Magnesium, Kalzium und Natrium befeuchtet und ergänzt Oxyal® den Tränenfilm und hilft, dessen Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohltuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus. Oxyal® ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige Sicht ohne Schlieren ermöglicht.

Und das können Sie persönlich tun:

- Legen Sie bei Bildschirmarbeit öfter eine kurze Pause ein.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Lüften Sie regelmäßig.
- Schützen Sie Ihre Augen vor Wind, wenn Sie sich im Freien aufhalten.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto oder Flugzeug, nicht auf die Augen.

Oxyal® I981EU-1, 2017-01